




EK601 MONO-BİPOLAR ELEKTROKOTER KULLANIM KILAVUZU

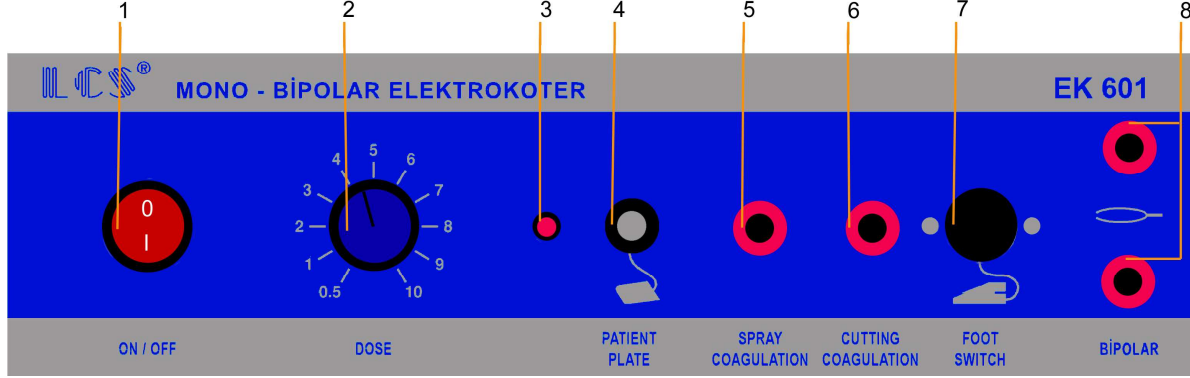

1. ON/OFF Cihazı açma-kapamaya yarayan anahtar.
2. Çıkış gücünü ayarlama düğmesi.
3. Pedala basıldığında enerji çıkışının olduğunu gösteren ışıklı led.
4. Patient plate (Şase plağı); Bu plak hastaya müdahale edilen bölgenin en yakınına iyi bir şekilde irtibatlandırılmalıdır (Tercihen iletken jel sürülerek.). İyi temas sağlanmadığında yeterli güçte müdahale yapılamayacağı gibi, bu plağın irtibatlandırıldığı bölgede yanmalar meydana gelebilir.
5. Spray coagulation (Yakma ve pıhtılaştırma) çıkışı.
6. Cutting coagulation (Kesme ve pıhtılaştırma) çıkışı.
7. Foot switch (Ayak pedalı) soketi: Çıkışlar ayak pedalına basılarak gerçekleştirilir.
8. Bipolar çıkışı. Bu çıkış kesilen damar ağzlarını özel penseti ile daraltarak kanamayı önler.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Cihazı uzun süre kesintisiz kullanmayınız. Kısa aralıklarla da olsa dinlendiriniz.
- 2- Aynı anda üç çıkıştan (Cutting coagulation, spray coagulation, bipolar) birini kullanınız. İki çıkışı aynı anda kullanmayınız.
- 3- Kesme/yakma elektrodunu çıkış anında şase plağıyla kısa devre yaptırmayınız.

CIHAZLA BİRLİKTE VERİLEN STANDART AKSESUARLAR

- 1- 1 adet monopolar kesme/yakma probu (Enterraptör) ve kablosu.
- 2- 1 adet patient plate (Toprak elektrodu) ve kablosu.
- 3- Monopolar müdahalelerde kullanılan özel kabında 8 adet muhtelif elektrot.
- 4- 1 adet foot switch (Ayak pedalı)
- 5- 1 adet bipolar penset ve kablosu(Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cutting&coagulation (Kesme ve pıhtılaştırma) : 60 W
- Spray & coagulation (Yakma ve pıhtılaştırma) : 60 W
- Bipolar : 40 W
- Çalışma frekansı (yaklaşık): 350 kHz
- Besleme voltajı : 220 V. 50 Hz
- Boyutları : 250x80x200 mm
- Ağırlık : 2.0 kg
- Garanti : 2 YIL